



ActiV.A.C.™

Anschluss für Stromkabel

Touchscreen

Kanister

## Therapieeinheit Kurzanleitung

Ein-/Ausschalttaste

Bildschirmmodus  
Aktuelles Datum  
Aktuelle Uhrzeit

Akustisches Signal stummschalten


Therapie **Ein/Aus**

Rotierendes Symbol = Unterdruck  
ist aktiviert

Hilfe

Akkuladezustand

Bildschirmsperre

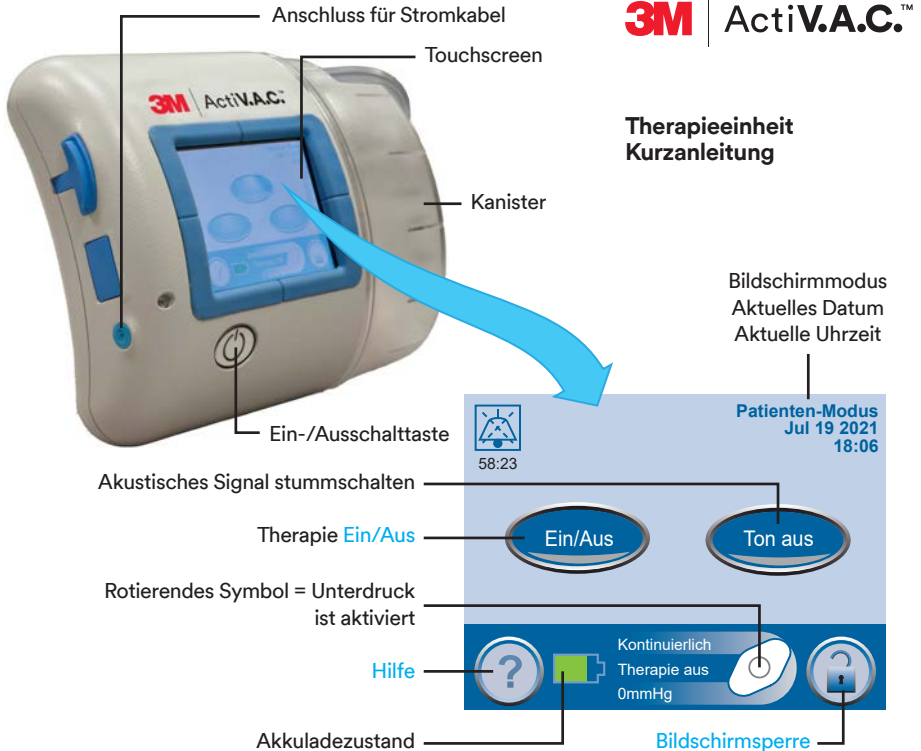

## Vor Verwendung der 3M™ ActiV.A.C.™ Therapieeinheit

Lesen Sie diese Kurzanleitung, das Benutzerhandbuch und die Sicherheitshinweise aufmerksam mit Ihrem Arzt oder dem medizinischen Fachpersonal durch. Bewahren Sie diese Dokumente zur Referenz zusammen mit dem Gerät auf.

Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur 3M™ ActiV.A.C.™ Therapieeinheit finden Sie im Benutzerhandbuch.

## Rufen Sie in Notfällen den örtlichen Notdienst an.

## Beginnen mit der Therapie



Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste und halten Sie sie ca. zwei Sekunden lang gedrückt, um die Therapieeinheit ein- oder auszuschalten.

Drücken Sie diese Taste, um die Therapie zu starten bzw. zu stoppen.

Grün = ein, grau = aus



## Bestätigungsbildschirm

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt, wenn das Produkt erkennt, dass die Ein-/Ausschalttaste gedrückt wurde, um das Produkt auszuschalten. Gleichzeitig ertönt ein Signalton.



Drücken Sie **Ja**, um das Gerät auszuschalten. Drücken Sie **Nein**, um zum **Startbildschirm** zurückzukehren.

## Entfernen des Kanisters



Drücken Sie die Kanister-entriegelung nach unten.

Ziehen Sie den Kanister direkt aus der Therapieeinheit heraus.

## Einsetzen des Kanisters



Schieben Sie den Kanister über die Kanisterführung.

Drehen oder neigen Sie den Kanister dabei nicht.

Drücken Sie den Kanister fest in die Therapieeinheit, bis er hörbar einrastet.

## Warnmeldungen und Alarme

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.



3M (Schweiz) GmbH  
Eggstrasse 91  
8803 Rüschlikon  
Switzerland



3M Deutschland GmbH  
Health Care Business  
Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss, Germany

UK Responsible Person  
3M United Kingdom PLC  
3M Centre, Cain Road  
Bracknell, RG12 8HT,  
United Kingdom

KCI now part / fait désormais  
of 3M / partie de 3M



KCI USA, Inc.  
12930 IH 10 West  
San Antonio, TX 78249 USA  
1-800-275-4524 (US Only)  
3M.com  
HCBRegulatory.3M.com

In Kanada unter Lizenz verwendet. © 2022, 3M. Nichtautorisierte Benutzung ist untersagt. Alle Rechte vorbehalten. 3M und die anderen erwähnten Markenzeichen sind Marken und/oder eingetragene Marken. 422532-DE Rev A 07/2022